

# BD Eclipse™ Säkerhetskanyl


## Handhavandeinstruktion




1. Kanylen fästes ordentligt på sprutan. Det hörs då ett tydligt "klickljud". Vid användning av Luer-Lock spruta, tryck lite extra för att gänga på sprutan ordentligt.



2. Det rosa säkerhetsskyddet dras uppåt och helt tillbaka längs med sprutan.

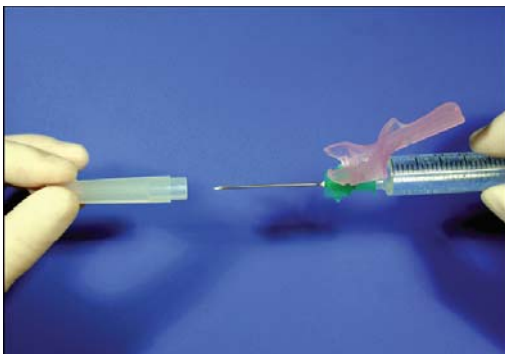

3. Ta av skyddshylsan.

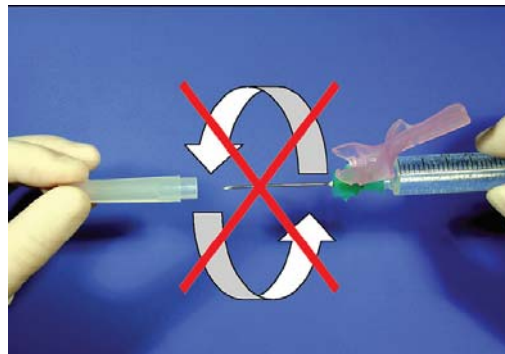

4. OBS: Hylsan skall **ej** tas av med en roterande rörelse.



5. Efter injektionen aktiveras säkerhetsskyddet (fälls över nålen) med ett finger och med enhandsgrepp.



6. Det hörs ett "klick" när skyddet är helt på plats över nålen. Kanylen bör sedan kasseras i behållare för stickande/skärande avfall.