


Information gällande ENFit/ENPlus aggregat med VarioLine Adapter

Fresenius Kabi har under en längre tid uppdaterat våra medicintekniska produkter för att minska risken för felkopplingar. Detta innebär att vi introducerat ENFit och ENPlus kopplingar på alla våra medicintekniska produkter avsedda för enteral nutrition, detta enligt gällande ISO standarder. Som en del i arbetet med säkrare produkter så har vi enligt ISO 18250-3 infört ENPlus på VarioLine adaptern som bland annat finns på våra aggregat, se nedan:


ENPlus koppling VarioLine adapter

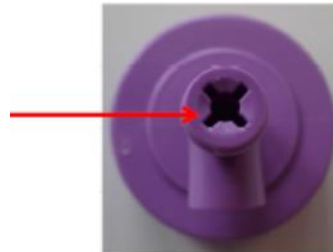

Detta innebär att ENPlus kopplingen på aggregatet och VarioLine adaptern nu uppfyller säkerhetskraven enligt gällande ISO standarder.

Vi vill i samband med detta uppmärksamma er på nedan hanteringsanvisning på ENFit/ENPlus aggregat med VarioLine adapter:

Instruktion för bortkoppling av VarioLine adapter

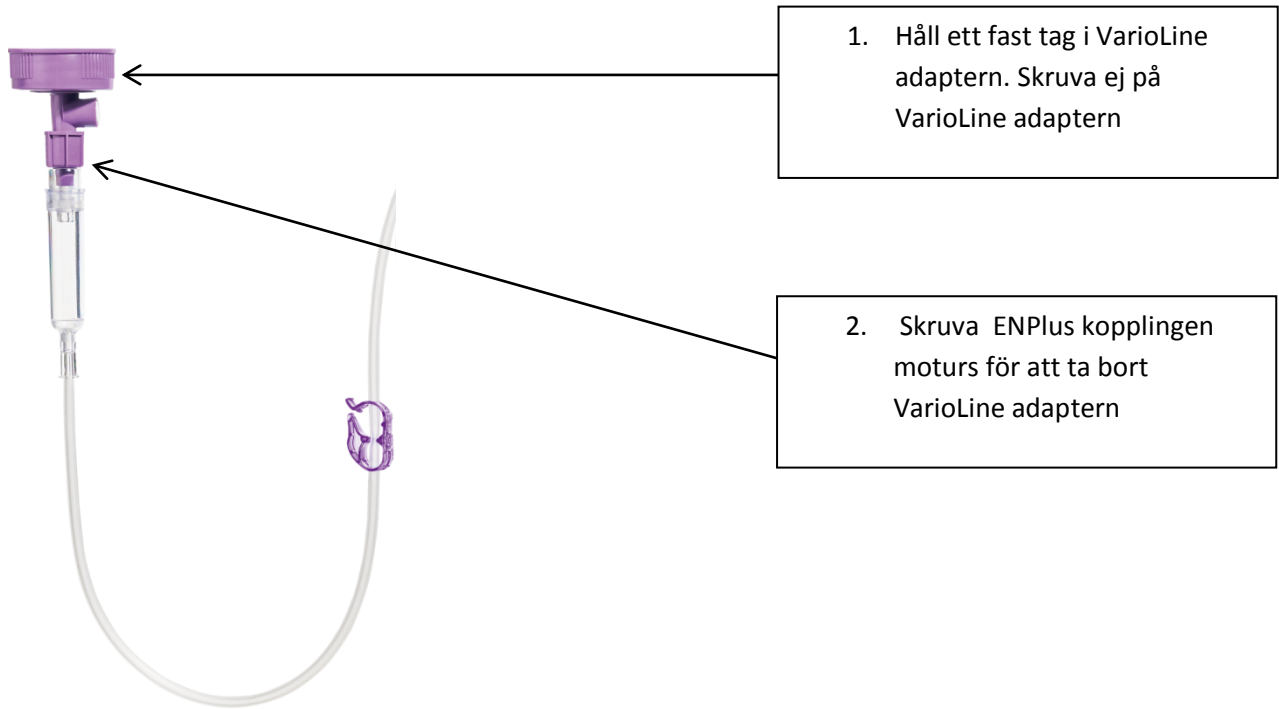

VarioLine adaptern ska inte skruvas av aggregatet, utan aggregatet ska skruvas av från VarioLine adaptern:



Med Vänlig Hälsing

Fresenius Kabi